

QuickSleeper® 5



Anesthésie immédiate, efficace et indolore.


Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie
qui changent la vie



L'anesthésie ostéocentrale

En bref

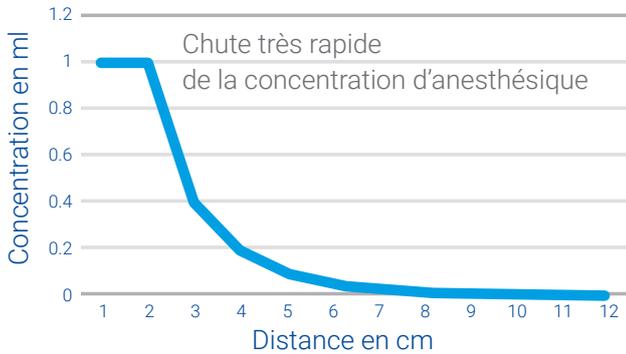

Une technique particulièrement efficace

"La solution anesthésique est déposée le plus près possible de la cible à atteindre que sont les apex. Nous savons que les échecs en anesthésie sont souvent liés à une distance injection-cible trop importante qui entraîne la trop grande dilution de notre solution anesthésique et son inefficacité."

Dr. P.Y. GREAUD - Omnipraticien, Brains (44)
Le fil dentaire

Une pratique efficiente !



L'efficacité repose sur un protocole simple en 3 étapes :


1. Anesthésie muqueuse avec une insertion indolore.
2. Perforation osseuse.
3. Injection à proximité des apex pour une efficacité immédiate.



Optimisez toutes vos anesthésies sans nécessité de rappel palatin et lingual

Ces données sont indiquées à titre indicatif et varient selon le vasoconstricteur, le patient et sa pathologie.

- Anesthésie profonde :** pulpectomie, pulpotomie, traitements canalaires, extraction, détartrage profond, soins multiples, pulpite.
- Anesthésie semi-profonde :** soins amérodentinaire.
- Soins amélaire,** détartrage.

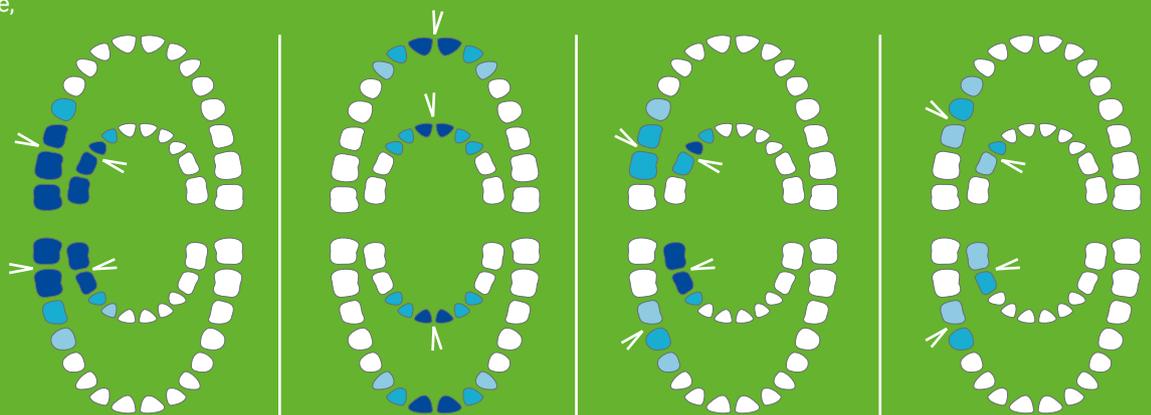

1

3/4


1/2

1/4

Pourquoi choisir l'anesthésie ostéocentrale avec QuickSleeper ?

Le seul système au monde qui permet d'injecter facilement l'anesthésique à proximité des apex.

- + Anesthésie **immédiate, indolore et profonde**
- + Efficace même sur **molaire mandibulaire en pulpite**
- + **Pas d'engourdissement** inutile des tissus mous
- + **Contrôle** de la quantité nécessaire injectée
- + **Jusqu'à 6 dents anesthésiées** avec une seule injection
- + **Travail sur plusieurs secteurs** dans la même séance
- + **Facilite une organisation** en rendez-vous longs

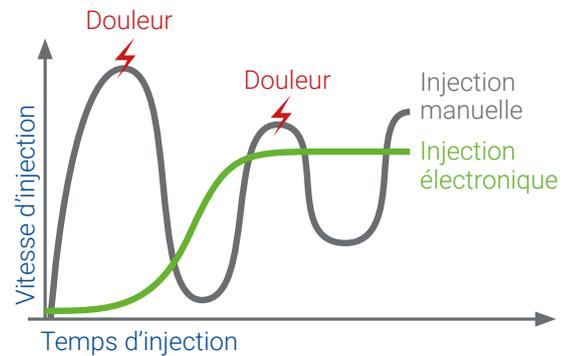

Le QuickSleeper s'avère (...) être un outil performant pour les chirurgiens-dentistes, il représente, à de nombreux points de vue, un progrès tangible en pratique quotidienne.

Dr. D. GERDOLLE - Dentisterie esthétique, Montreux (Suisse)



QuickSleeper ⑤



Plus d'informations sur www.dentalhitec.com

QuickSleeper⁵

Un accompagnement 360°

- + **Un accès facilité** à tous les services (formations, appareil, vidéos,...).
- + **Un guide complet** pour bien démarrer avec QuickSleeper.
- + **Des vidéos cliniques** par secteur, chez l'adulte et l'enfant.
- + **Une question clinique ?** Un dentiste expert de l'anesthésie ostéocentrale vous répond.



+ Un accès complet à la **bibliographie**.

*"Le Quicksleeper est pour moi une nouvelle façon de travailler. Cet instrument a permis de **réduire mon stress** face aux échecs, et de réduire de façon significative ma quantité d'injection d'anesthésiants. En effet un cas d'urgence avec une pulpite sur une 6 mandibulaire est géré facilement avec une seule cartouche d'anesthésie en intra-osseuse **sans douleur et le travail est immédiat, sans temps d'attente**. La majorité des patients me demandent "où sont passées l'aiguille et la piqûre", c'est un réel soulagement pour eux, ainsi que pour moi.*

*J'ai un **gain de temps et de confort** sur chacun de mes actes. Ils apprécient également la perte de sensation du signe de Vincent. Le Quicksleeper sera un confort pour vos patients mais tout d'abord pour vous."*

Dr A. SETTE
Omnipraticien,
Morcenx-la-Nouvelle
(40)



Dentahitec

Les stylos d'anesthésie qui changent la vie

ZI de l'Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE
02 41 56 41 91 · mail@dentahitec.com



www.dentahitec.com

